

## Odhad epitézy podle velikosti prádla

Nejdříve určíme podle předchozí tabulky správnou velikost prádla.

Pak v odpovídajícím sloupečku určíme orientační velikost příslušného typu epitézy.

Tento způsob určení velikosti je pouze orientační. Nezohledňuje způsob provedené operace, typ postavy, materiál ani střih prádla.

Při výběru se spoléhejte na vlastní úsudek, praktické zkušenosti a cit.

Košiček	Obvod pod prsy v cm																		
AA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120							
A	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120						
<b>B</b>			65	70	75	<b>80</b>	85	90	95	100	105	110	115	120					
C				65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120				
D					65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120			
E						65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		
F							65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
G											75	80	85	90	95	100	105	110	115

### Epitézy Amoena

Contact Energy Natura Essential

### Velikost epitézy

0 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15\* 16\* 17\*

\* Pouze v provedení Amoena Essential light 2S a Amoena Natura light 2S

### Pooperační epitézy Amoena (textilní)

Priforms




### Velikost epitézy

1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

### Korekční epitézy Amoena


Amoena Balance

### Tvar Velikost

Delta <sup>1,2</sup> 		1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
Oval <sup>1</sup> 	0/1	2/3	4/5	6/7	8/9	
Varia <sup>1</sup> 		S	M	L	XL	

<sup>1</sup> Všechny korekční epitézy Amoena Balance se vyrábějí také v provedení Amoena Balance Contact

## Jak vybrat správný tvar epitézy Amoena, aby odpovídal tvaru prsu

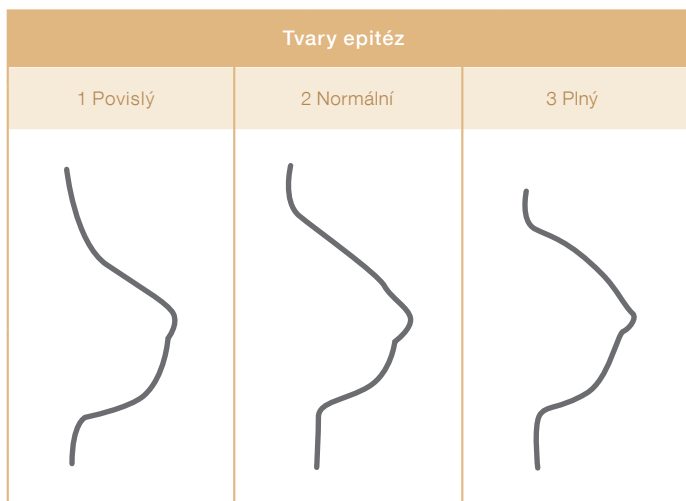

Ženský hrudník se neliší pouze obvodem a velikostí podprsenky, ale i tvarem prsu. Proto Amoena nabízí tři různé tvary epitéz. Každému tvaru je přiřazeno číslo (1 – povislý, 2 – normální, 3 – plný).

Jakmile zvolíte správnou velikost epitézy, pokračujte výběrem správného tvaru, který odpovídá zdravému prsu zákaznice. Poté vybranou epitézu vložte do dobře padnoucí podprsenky a porovnejte souměrnost se zdravými prsem. Rozdíly jsou nejlépe patrné v obepnutém jednobarevném tričku.

